

Oticon Medical vous aide à préparer vos vacances en toute sérénité grâce à cette **Fiche Vacances** intégrant toutes les informations à connaître avant de partir !




## Pack Sérénité


Vous pouvez souscrire un **Pack Sérénité** qui vous permet de louer un processeur de prêt durant vos vacances. *Contactez le Service Clients au moins 15 jours avant votre départ.*

Pensez à avertir votre compagnie d'assurance afin d'assurer votre processeur de prêt.

**Si vous voyagez à l'étranger, Oticon Medical vous suit partout dans le monde en cas de besoin.**

Pour obtenir les coordonnées précises ou contacter nos bureaux locaux, consultez notre site Web [www.oticonmedical.com/fr](http://www.oticonmedical.com/fr), rubrique « A propos d'Oticon Medical – Sélection du pays » > « Nous contacter ».

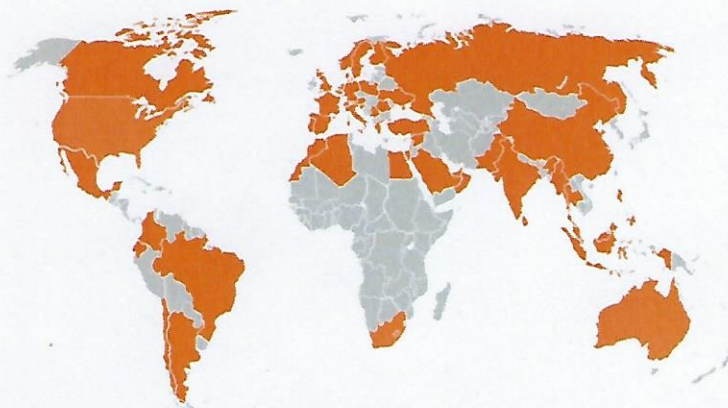

 Bureaux Oticon Medical –  
Systèmes d'implants cochléaires

### Pour contacter le Service Clients Oticon Medical



**Ligne directe : 04 93 95 38 29**  
(Du lundi au jeudi: 8h30-18h00 – le vendredi:  
8h30-17h00)

**SMS : 07 55 51 24 19**



**Info-ic@oticonmedical.fr**



**Oticon Medical**  
2720 Chemin St Bernard  
06220 Vallauris



**[www.oticonmedical.com/fr](http://www.oticonmedical.com/fr)**



**<https://shop.oticonmedical.com/fr>**

## Voyager en avion

N'oubliez pas de prendre et de présenter votre **carte de porteur** aux agents de sécurité lors du passage aux portiques de sécurité et d'éteindre votre processeur de son. Vous pouvez prendre l'avion avec votre implant cochléaire, et selon les recommandations de l'US Federal Aviation Administration, vous pouvez laisser **vos processeur de son activé** lors des phases de décollage et d'atterrissage de l'avion.



### Que devez-vous prendre dans votre valise ?

Hormis votre crème solaire,  
Prévoyez quelques accessoires de rechange !

#### Pensez à prendre :

- Un cordon d'antenne et une antenne avec aimant
- Des piles (*anticipez vos besoins!*) / vos batteries rechargeables\*
- Votre chargeur de batterie\*
- Votre boîte de dessiccation chauffante avec ses pastilles de dessiccant (*utiles pendant l'été!*)
- Un accessoire de maintien pour les activités sportives

## Quelques accessoires pratiques



La **housse clip** protège votre processeur de son de la transpiration et de l'humidité. Idéal pour les activités de plein air !



Le **cordon de maintien** permet d'éviter la chute ou la perte d'un ou 2 processeurs de son. Idéal pour les activités sportives !



Le **Silhouette** vous permet de connecter votre processeur de son à votre téléphone portable ou à votre lecteur MP3, utile pour les longs trajets.

\*pour Neuro 2